



Cânula de Guedell

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de intubação com o objetivo de manter a língua distante da parede posterior da faringe ou para proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes.

CÂNULAS OROFARÍNGEAS(GUEDELL):

| Tamanho | Medida | Cor | Código |
|---------|--------|----------|------------|
| Nº0 | 50 mm | Azul | 1-100-7019 |
| Nº1 | 60 mm | Preta | 1-100-7020 |
| Nº2 | 70 mm | Branca | 1-100-7021 |
| Nº3 | 80 mm | Verde | 1-100-7022 |
| Nº4 | 90 mm | Amarela | 1-100-7023 |
| Nº5 | 100 mm | Vermelha | 1-100-7024 |

Informações:

- Cânula oferecida por tamanho (Caixa com 10 unidades).
- Conjunto de 6 cânulas na cor branco leitoso, com acabamento colorido para fácil identificação em polipropileno.
- Produto não Estéril.
- Marca Oxigel.

Código 1-100-7036
Conjunto com 6 Unidades



Oxigel Materiais Hosp. Ind. e Com. Eireli
PABX: 11 5567 1766 - Vendas: 11 5567 1764



WhatsApp: 11 5567 1762

oxigel@oxigel.com.br

www.oxigel.com.br

CONJ. DE CÂNULAS OROFARÍNGEAS (GUEDEL)
Registro no M.S. 10330520036
(NÃO ESTERILIZADO)

Nº PARTE: **1.100.7036**

| | | | | |
|------------------|------------------------|-------|----------|------------|
| Conteúdo: | Cânula orofaríngea nº0 | 50mm | Azul | 1.100.7019 |
| | Cânula orofaríngea nº1 | 60mm | Preta | 1.100.7020 |
| | Cânula orofaríngea nº2 | 70mm | Branca | 1.100.7021 |
| | Cânula orofaríngea nº3 | 80mm | Verde | 1.100.7022 |
| | Cânula orofaríngea nº4 | 90mm | Amarela | 1.100.7023 |
| | Cânula orofaríngea nº5 | 100mm | Vermelha | 1.100.7024 |

DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de intubação com o objetivo de manter a língua distante da parede posterior da faringe ou para proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: Resina de EVA.

Apresentação: Conjunto de 6 cânulas na cor branco leitoso, com acabamento colorido em polipropileno.

Tamanhos: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm

ADVERTÊNCIAS:

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. O uso do produto requer treinamento especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
3. RECOMENDA-SE O USO do produto em um ÚNICO paciente.
4. O produto não pode ser autoclavado.
5. Para boa performance e vida longa, todas as instruções deverão ser estritamente seguidas.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Ver figura na página 02/02 para a identificação dos tamanhos.
2. Selecione o tamanho adequado ao paciente verificando na parte posterior da cânula (parte mais larga) a identificação do comprimento em milímetros. O tamanho adequado é aquele que vai da rima bucal até o ângulo da mandíbula.
3. Antes do uso, verifique a integridade física do produto.
4. Introduza a cânula, abaixando a língua com uma espátula, inserindo-a cuidadosamente seguindo a curvatura da língua e do palato. Outras técnicas poderão ser usadas.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE ROTINA:

O produto é um artigo semicrítico e, como tal, deve passar por um processo de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
2. Mantenha o produto totalmente imerso na solução por um período de 30 minutos.
3. Usando luvas, enxague em álcool ou água estéril e deixe secar.
4. Acondicione-o de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

MANUTENÇÃO:

Este produto não é passível de manutenção, portanto a qualquer sinal de alteração nas suas características originais, o produto deverá ser descartado.

CONJUNTO DE CÂNULAS



nº 0 nº 1 nº 2 nº 3 nº 4 nº 5
50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de ± 5°C / 5%.

NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem plástica do conjunto ou de cada um dos componentes.

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 1(um) ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc. ocorrem por conta do comprador.

Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
Rua Eng. Jorge Oliva, 151 - V. Mascote - CEP 04362-060
São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766
CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-2
Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: oxigel@oxigel.com.br - Indústria Brasileira
Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

| CÓDIGO | REVISÃO Nº | DATA | PÁGINA |
|------------|------------|-----------|---------|
| 3-990-0009 | 08 | Jul./2022 | 01 / 02 |

| CÓDIGO | REVISÃO Nº | DATA | PÁGINA |
|------------|------------|-----------|---------|
| 3-990-0009 | 08 | Jul./2022 | 02 / 02 |

CONJ. DE CÂNULAS OROFARÍNGEAS (GUEDEL)
Registro no M.S. 10330520036
(NÃO ESTERILIZADO)

| Nº PARTE: | 1.100.7036 | | | |
|------------------|------------------------|-------|----------|------------|
| Conteúdo: | Cânula orofaríngea nº0 | 50mm | Azul | 1.100.7019 |
| | Cânula orofaríngea nº1 | 60mm | Preta | 1.100.7020 |
| | Cânula orofaríngea nº2 | 70mm | Branca | 1.100.7021 |
| | Cânula orofaríngea nº3 | 80mm | Verde | 1.100.7022 |
| | Cânula orofaríngea nº4 | 90mm | Amarela | 1.100.7023 |
| | Cânula orofaríngea nº5 | 100mm | Vermelha | 1.100.7024 |

DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de intubação com o objetivo de manter a língua distante da parede posterior da faringe ou para proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: Resina de EVA.

Apresentação: Conjunto de 6 cânulas na cor branco leitoso, com acabamento colorido em polipropileno.

Tamanhos: 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm

ADVERTÊNCIAS:

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. O uso do produto requer treinamento especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
3. RECOMENDA-SE O USO do produto em um ÚNICO paciente.
4. O produto não pode ser autoclavado.
5. Para boa performance e vida longa, todas as instruções deverão ser estritamente seguidas.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Ver figura na página 02/02 para a identificação dos tamanhos.
2. Selecione o tamanho adequado ao paciente verificando na parte posterior da cânula (parte mais larga) a identificação do comprimento em milímetros. O tamanho adequado é aquele que vai da rima bucal até o ângulo da mandíbula.
3. Antes do uso, verifique a integridade física do produto.
4. Introduza a cânula, abaixando a língua com uma espátula, inserindo-a cuidadosamente seguindo a curvatura da língua e do palato. Outras técnicas poderão ser usadas.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE ROTINA:

O produto é um artigo semicrítico e, como tal, deve passar por um processo de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
2. Mantenha o produto totalmente imerso na solução por um período de 30 minutos.
3. Usando luvas, enxague em álcool ou água estéril e deixe secar.
4. Acondicione-o de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

MANUTENÇÃO:

Este produto não é passível de manutenção, portanto a qualquer sinal de alteração nas suas características originais, o produto deverá ser descartado.

CONJUNTO DE CÂNULAS



nº 0 50mm nº 1 60mm nº 2 70mm nº 3 80mm nº 4 90mm nº 5 100mm

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$.

NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem plástica do conjunto ou de cada um dos componentes.

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 1(um) ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc. ocorrem por conta do comprador.

Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI

Rua Eng. Jorge Oliva, 151 - V. Mascote - CEP 04362-060

São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766

CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-2

Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: oxigel@oxigel.com.br - Indústria Brasileira

Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

| CÓDIGO | REVISÃO Nº | DATA | PÁGINA |
|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| 3-990-0009 | 08 | Jul./2022 | 01 / 02 |

| CÓDIGO | REVISÃO Nº | DATA | PÁGINA |
|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| 3-990-0009 | 08 | Jul./2022 | 02/02 |