



Guia de Intubação (Mandril)

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de intubação com o objetivo de auxiliar a introdução da sonda, uma vez que introduzido dentro do tubo endotraqueal lhe confere formato e resistência adequados para facilitar a intubação.


Guia (Mandril)	Dimensões Diâmetro x Comprimento	Modelos Sem Botão	Modelos Com Botão
Adulto	3,2 mm x 420 mm	1-100-0013	1-100-0196
Infantil	2,0 mm x 300 mm	1-100-0014	1-100-0197

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Guia adulto fabricado em cobre flexível cromado.
- Guia Infantil fabricado em aço inoxidável flexível.
- Botão de regulagem fabricado em policarbonato com conexão 15 mm fêmea.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Guia metálico poder ser esterilizado em autoclave.
- Botão em policarbonato autoclavável à 121°C até no máximo 4 minutos. Autoclave os itens separadamente. **ALERTA:** (Evitar contato entre as peças).

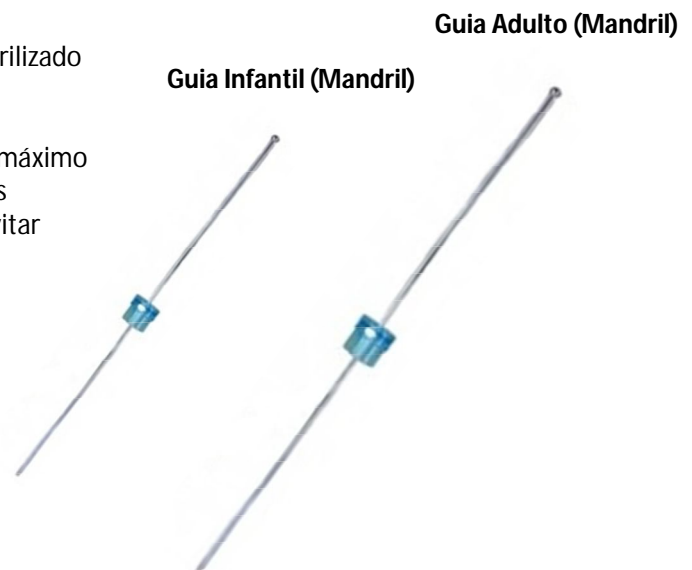

Oxigel Materiais Hosp. Ind. e Com. Eireli
PABX: 11 5567 1766 - Vendas: 11 5567 1764



WhatsApp: 11 5567 1762

oxigel@oxigel.com.br

www.oxigel.com.br

GUIA DE ENTUBAÇÃO (MANDRIL)

Reg. No M.S. 10330520034

(NÃO ESTERILIZADO)

Nº PARTE:	Modelo:	Com botão	Sem botão
	Adulto	1.100.0196	1.100.0013
	Infantil	1.100.0197	1.100.0014

CONTEUDO:

1 (um) guia de entubação adulto ou infantil, com ou sem botão conforme referencias acima.

DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de entubação com o objetivo de auxiliar a introdução da sonda, uma vez que introduzido dentro do tubo endotraqueal lhe confere formato e resistência adequados para facilitar a entubação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: Guia Adulto fabricado em tubo de cobre flexível cromado e Guia infantil fabricado em aço inoxidável, botão em policarbonato injetado.

Dimensões do guia Adulto: diâmetro de 3,2 x 420 mm de comprimento.

Dimensões do guia Infantil: diâmetro de 2mm x 300 mm de comprimento.

Botão: Conexão 15mm fêmea

ADVERTÊNCIAS:

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. O uso do produto requer treinamento especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
3. Exceto o botão, o guia pode ser autoclavado.
4. Para boa performance e vida longa, todas as instruções deverão ser estritamente seguidas.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Ver figura na página 02/02 para identificação do produto
2. Verifique a integridade física do produto.
3. Introduza totalmente o guia por dentro da sonda.
4. Ajuste o botão (quando houver) encaixando-o na parte posterior do tubo.
5. Dobre o tubo, conformando-o na curvatura desejada.
6. Introduza o tubo cuidadosamente de forma a instalá-lo corretamente.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE ROTINA:

O produto é um artigo semicrítico e, como tal, deve passar por um processo de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Desmonte o produto, separe suas partes e remova qualquer resíduo existente.
2. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
3. Mantenha as partes do produto totalmente imersas na solução por um período de 30 minutos.
4. Usando luvas, enxágue as partes em álcool ou água estéril e deixe secar.
5. Monte o produto e acondicione-o de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

Obs.: A parte metálica poderá ser esterilizada em autoclave

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0023	06	Jul./2022	01/02

MANUTENÇÃO:

Verifique periodicamente a integridade física do guia e suas partes. Para manutenção, procure uma Assistência Técnica Autorizada Oxigel. A manutenção do produto exige pessoal técnico treinado e a utilização de componentes originais.

Guia de entubação (Mandrill)



ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$.

NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem plástica do conjunto ou de cada um dos componentes.

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc. ocorrem por conta do comprador.

Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI

Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060

São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766

CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-2

Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: oxigel@oxigel.com.br - Indústria Brasileira

Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0023	06	Jul./2022	02/02

GUIA DE ENTUBAÇÃO (MANDRIL)

Reg. No M.S. 10330520034

(NÃO ESTERILIZADO)

Nº PARTE:	Modelo:	Com botão	Sem botão
	Adulto	1.100.0196	1.100.0013
	Infantil	1.100.0197	1.100.0014

CONTEUDO:

1 (um) guia de entubação adulto ou infantil, com ou sem botão conforme referencias acima.

DESCRIÇÃO / INDICAÇÕES:

O produto é projetado e indicado para uso em procedimentos de entubação com o objetivo de auxiliar a introdução da sonda, uma vez que introduzido dentro do tubo endotraqueal lhe confere formato e resistência adequados para facilitar a entubação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: Guia Adulto fabricado em tubo de cobre flexível cromado e Guia infantil fabricado em aço inoxidável, botão em policarbonato injetado.

Dimensões do guia Adulto: diâmetro de 3,2 x 420 mm de comprimento.

Dimensões do guia Infantil: diâmetro de 2mm x 300 mm de comprimento.

Botão: Conexão 15mm fêmea

ADVERTÊNCIAS:

As seguintes advertências e cuidados devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1. O uso do produto requer treinamento especializado, de forma que o produto só pode ser usado por pessoas que tenham recebido tal treinamento.
2. O produto pode provocar infecção cruzada de paciente para paciente e, portanto, devem ser seguidos os procedimentos de desinfecção descritos adiante.
3. Exceto o botão, o guia pode ser autoclavado.
4. Para boa performance e vida longa, todas as instruções deverão ser estritamente seguidas.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Ver figura na página 02/02 para identificação do produto
2. Verifique a integridade física do produto.
3. Introduza totalmente o guia por dentro da sonda.
4. Ajuste o botão (quando houver) encaixando-o na parte posterior do tubo.
5. Dobre o tubo, conformando-o na curvatura desejada.
6. Introduza o tubo cuidadosamente de forma a instalá-lo corretamente.

PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE ROTINA:

O produto é um artigo semicrítico e, como tal, deve passar por um processo de desinfecção antes do uso. Para isso:

1. Desmonte o produto, separe suas partes e remova qualquer resíduo existente.
2. Prepare solução de Glutaraldeído a 2% de acordo com as instruções do fabricante.
3. Mantenha as partes do produto totalmente imersas na solução por um período de 30 minutos.
4. Usando luvas, enxágue as partes em álcool ou água estéril e deixe secar.
5. Monte o produto e acondicione-o de modo a ficar protegido contra contaminação até a sua utilização.

Obs.: A parte metálica poderá ser esterilizada em autoclave

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0023	06	Jul./2022	01/02

MANUTENÇÃO:

Verifique periodicamente a integridade física do guia e suas partes. Para manutenção, procure uma Assistência Técnica Autorizada Oxigel. A manutenção do produto exige pessoal técnico treinado e a utilização de componentes originais.

Guia de entubação (Mandrill)



ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em local limpo, fresco e seco, sob temperaturas entre 5°C e 35°C e umidade relativa do ar entre 40 e 75%. Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos. Para transporte são admitidas variações de $\pm 5^\circ\text{C} / 5\%$.

NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE, MODELO E DATA DE FABRICAÇÃO:

Ver rótulo colado na embalagem plástica do conjunto ou de cada um dos componentes.

GARANTIA:

O produto é garantido pelo prazo de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra pelo consumidor final, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra, desde que seja obedecida esta instrução. Despesas de transporte etc. ocorrem por conta do comprador.

Não perca ou altere o rótulo que acompanha o produto durante sua vida útil.

FABRICADO E PRODUZIDO POR:

OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EIRELI

Rua Eng. Jorge Oliva, 131 - V. Mascote - CEP 04362-060

São Paulo - SP - Tel.: +55 11 5567 1766

CNPJ: 49.353.956/0001-66 - Autorização de funcionamento M.S.: 1.03.305-2

Home Page: <http://www.oxigel.com.br> - E-mail: oxigel@oxigel.com.br - Indústria Brasileira

Resp. Técnico: DÉBORA C. DE SOUZA – CRQ 04496795

CÓDIGO	REVISÃO Nº	DATA	PÁGINA
3-990-0023	06	Jul./2022	02/02